


# Косметический аппарат FAVLUX (модель В-8320В)

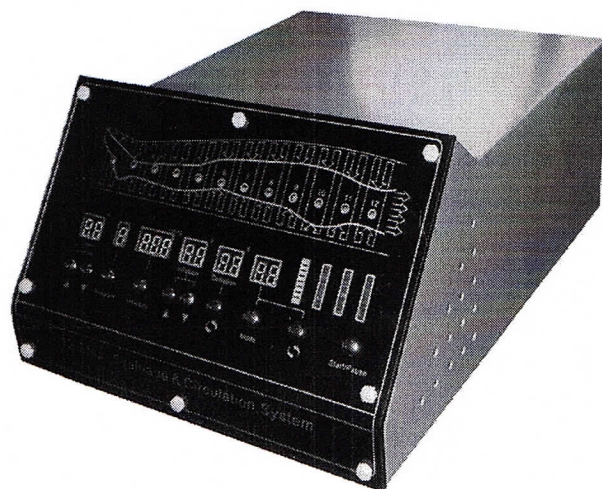

**ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ И  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Благодарим вас за приобретение данного устройства.

Для ознакомления со всеми его характеристиками и правилами безопасного использования настоятельно рекомендуем подробно ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Сберегайте данную инструкцию и обращайтесь к ней всякий раз при использовании данного устройства.

### **Введение:**

Устройства, использующие в качестве рабочей среды сжатый воздух, очень ценятся не только среди специалистов мирового медицинского сообщества, но и среди косметологов – они нашли свое применение в терапевтических процедурах. Теперь научный и технический прогресс шагают семимильными шагами. Результатом наших усилий и стал этот незаменимый инструмент, который мы смогли сделать не только малозатратным, но и надежным и безопасным в эксплуатации, способным эффективно бороться с целым рядом симптомов.

Данный инструмент превосходно подходит для работы со следующими симптомами: избыточное потоотделение, накопление токсинов и жировых отложений, варикозное расширение вен, проявление капиллярной сетки на коже и т.д. Костюм для проведения пневмопроцедур представляет собой подобие подушки безопасности, в котором рабочее вещество – сжатый воздух – подвергается попеременному сжатию, в результате происходит стимуляция лимфатической системы, активизируется разложение жировых отложений, выводятся токсины, улучшается кровообращение, что в комплексе приводит к снижению массы тела пациента и поддержанию хорошего самочувствия.

Благодаря современным технологиям костюм для проведения процедур стал эффективным прорывным инструментом в области 3D-детоксикации. Согласно алгоритму программы управления костюмом для проведения пневмопроцедур, давление распределяется на 44 надувных подушки костюма для похудения (включая куртку, брюки, область пояса и обуви), размещаемых вдоль всего тела пациента, которые совершают толкающие и сдавливающие воздействия в различных режимах с различным давлением, костюмом очень легко пользоваться, он полностью заменяет такую обычную процедуру, как массаж. Отныне вам не придется выполнять сложные и болезненные упражнения для поддержания тела в тонусе и похудения. Благодаря нашей разработке трехмерной детоксикации вы можете наслаждаться профессиональным массажем в любом месте и в любое время. Испытываемые ощущения практически невозможно передать словами.

### **Применение устройства:**

1. Улучшение лимфо- и кровообращения, улучшение лимфодренажной функции, способствующей элиминации токсинов и других вредных веществ из тела пациента.
2. Смягчение и разделение жировых отложений, устранение отеков и избавление от излишка жира, поддержание стройного фигуры.
3. Лечение и профилактика целлюлита, профилактика варикозного расширения вен.
4. Поднятие тонуса, регуляция физиологических процессов в теле пациента, повышение иммунитета, что играет важную роль в восстановительный период после апоплексии и гемиплегии.

### **Функции устройства:**

- 24 камеры;
- Детоксикация;
- Коррекция фигуры, повышение тонуса;

- Похудение;
- Физическое воздействие на лимфатическую систему;
- Релаксация;
- Лечение целлюлита;
- Избирательное воздействие давлением на отдельные участки тела пациента;
- Длительность воздействия давлением регулируется кнопкой «повышение времени давления»;
- Длительность паузы регулируется кнопкой «понижение времени давления».

#### **Исключительные особенности устройства:**

1. Крупная цифровая панель отображает режим работы. Устройство простое в освоении и удобное в использовании.
2. Цифровые технологии управления предоставляют множество режимов для людей любого телосложения, позволяя индивидуально настроить длительность, ориентацию, позицию и создаваемое давление.
3. Особенный дизайн надувных подушек. На теле пациента размещается до 44 подушек. В результате процедура ощущается отдельно каждой частью тела.
4. Одновременно могут использоваться различные элементы костюма.
5. При изготовлении костюма для проведения пневмопроцедур (рубашка, брюки, пояс) использовался особый материал, легкий и мягкий на ощупь, приятный для тела, удобный в обслуживании и довольно прочный.

#### **Программа и режим:**

*Режим:* Доступен выбор 6 компрессионных режимов


*А: Оздоровление:* Подушки постепенно надуваются, удерживают давление, а затем сдуваются с ритмичностью, напоминающей массажные движения рук массажиста. В результате улучшается лимфо- и кровообращение, профилактируется варикозное расширение вен, происходит детоксикация кожной ткани, расслабление мышц и суставов, поднятие общего тонуса.

*В: Улучшение внешнего вида пациента:* Подушки постепенно надуваются, удерживают давление, а затем сдуваются с ритмичностью, напоминающей массажные движения рук сразу нескольких массажистов. Данная физиотерапия подходит для стимуляции лимфатической дренажной функции, детоксикации, поддержания стройных контуров тела, уменьшения отечности и избыточного потоотделения.


*С: Спорт:* Подушки надуваются, удерживают давление, а затем ритмично сдуваются. Тело ощущает ритмичное изменение нагрузки – наблюдается попеременный приток крови в мышцы. Процедура подходит для стимуляции кровообращения, сжигания излишних жиров, вытеснения излишней влаги, восстановления эластичности мышц, а также для достижения быстрых результатов в плане обретения идеальной фигуры.

#### **Панель управления:**

В-8320А

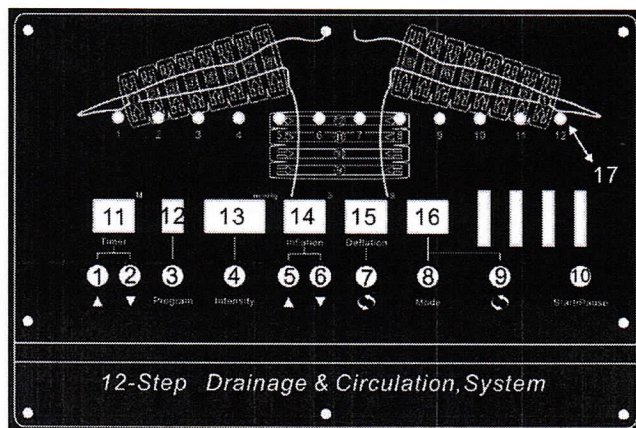

B-8320B

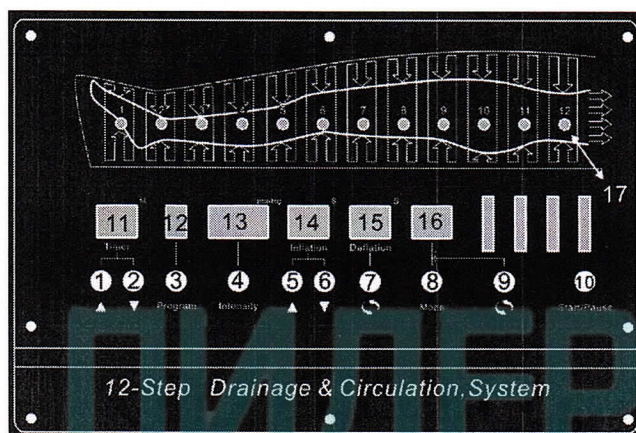

- 1,2. Регулировка продолжительности проведения процедуры (дольше, короче)
3. Выбор программы
4. Интенсивность (от 100 до 200 мм рт.ст.)
- 5,6. Регулировка продолжительности надувания подушек (дольше, короче)
7. Регулировка продолжительности сдувания подушек (циклы)
- 8,9. Выбор камер
10. Пуск/пауза
11. Отображение времени (60 мин)
12. Отображение программы (1-6)
13. Отображение интенсивности (от 100 до 200 мм рт.ст.)
14. Отображение продолжительности надувания подушек (0-19 с)
15. Отображение продолжительности сдувания подушек (0-6 с)
16. Отображение камер (12 или 4)
17. Рабочие камеры

#### Порядок выполнения процедур:

1. Переключите тумблер «Питание» (расположен на оборотной стороне прибора), при этом на приборе должен включиться световой индикатор.
2. Нажмите кнопку «Выбор программы» (MODE) – должен включиться индикатор (12).
3. Нажмите кнопку (8) и выберите любую часть тела по вашему желанию.
4. Нажмите на «Пуск/пауза» (10) – начнется выполнение программы.
5. Задайте продолжительность (1,2) или интенсивность (4).

**Примечание:** Помните: вначале необходимо задать режим, и только после этого нажать на кнопку «Пуск/пауза».

**Аксессуары:**

В-8320А



В-8320В



#### **ВНИМАНИЕ**

1. Для достижения более лучших результатов массажные процедуры выполнять с использованием специальных средств для укрепления кожи (гель или масло). Интенсивность должна регулироваться в соответствии с ощущениями пациента. В случае возникновения болевых ощущений проверьте, не контактирует ли электрод с кожей.
2. При использовании дальнего инфракрасного диапазона вначале необходимо установить 8 уровень, чтобы пациент почувствовал тепло, пожалуйста, после чего понизить интенсивность до 5-6 уровня. Сохраняйте эту температуру. В зависимости от времени года и температуры в помещении установите переключатель «зима/лето», расположенный на подножке, в нужное положение.
3. На протяжении всей процедуры косметолог должен вербально общаться с пациентом, интересоваться уровнем его комфорта и интенсивностью потоотделения с целью корректировки проведения процедуры.

#### **Технические характеристики:**

Марка:

Устройство: В-8320

Наименование:

Потребляемая мощность: 120 Вт

Компрессор:

Производительность: 50 л/мин

Создаваемое давление: 120 – 200 мм рт.ст.

Напряжение: 100...120 В, 220...240 В

Частота сети: 60 Гц, 50 Гц

Масса нетто: кг

Масса брутто: кг

Сертификация: СЕ