



Инструкция по сборке Комплектация

Обозначение	Наименование детали	Кол-во (шт.)	Примечание
Детали			
С 1	Стойка передняя	1	
С 2	Стойка задняя	1	
С 3	Подлокотник (левый, правый)	2	
С 4	Ригель (левый, правый)	2	
С 5	Навес спинки (левый, правый)	2	
С 6	Опора подушки для ног	2	
С 7	Штифт опоры подушки для ног	2	
С 8	Переходная втулка подлокотника	2	
Крепежные изделия			
К9	Растомат (10 позиционный)	2	
К10	Растомат (5 позиционный)	2	
К11	Опора М10	4	
К12	Болт М8х40	8	Крепление С1, С2 и С4
К13	Шайба Двнутр.=8	8	
К14	Навес подушки для ног №8	2	Сверлить 4 отверстия Ø8 мм.
К15	Винт «барашек» М8	2	
К16	Шайба стопорная D=5	10	
К17	Винт М6х16	4	Крепл. подушек подлок
К18	Винт М6х25 с прессшайбой	4	Крепл. подушек подлок
К19	Винт М6х20 с прессшайбой	16	Крепл. навесов подножки.+С6
К20	Саморез 4,8х16	2	Крепл. К14
К21	Саморез 4,8х19	10	Крепл. М22, М23
Мягкие элементы			
М22	Подушка спинки	1	
М23	Подушка сиденья	1	
М24	Подушка подлокотника	2	
М25	Подушка для ног	1	
	Заглушки 50х25	8	
	Заглушки 30х15	4	

Сборка кресла

1. Подготовить рабочее место и инструмент: ключи гаечные S 13.17, отвертка крестовая № 2, шило.
2. Распаковать изделие, проверить целостность деталей и комплектность.
3. Ввернуть в основания стоек поз. С1, С2 опоры К11.
4. Собрать основной каркас, скрепив стойки С1 и С2 с ригелями С4 болтами К12. Под головки болтов, перед их ввинчиванием, подложить шайбы К13 (на рисунке шайбы не показаны).
5. Надеть на оси ригелей С4 навесы спинки С5.
6. Установить на каркас и зафиксировать шайбами К16 растоматы К9, К10 как показано на рисунке.
7. Установить по разметке и закрепить на подушке для ног М25 опоры С6 с помощью винта К19.
8. Соединить с помощью навесов К14 подушку для ног М25 с подушкой сиденья М 23. Навесы крепить винтами К19 (вворачиваются в ближние к осям навесов отверстия) и саморезами К20 (по одному в дальние от осей навесов отверстия)
9. Установить на каркас подушки и закрепить саморезами К21.
10. Соединить Растоматы К9 с опорами С6 с помощью штифтов С7 и зафиксировать шайбами К16.
11. Закрепить на подлокотниках С3 подушки М24 с помощью винтов К17 и К18.
12. Вставить в каркасные направляющие подлокотников переходные втулки С8, если они не были установлены на предприятии изготовителе.
13. Установить на каркас подлокотники и зафиксировать в нужном положении винтами-барашками К15.
14. Установку подушек подножки и спинки в требуемое положение производить следующим образом:
 - а). Поднять подушку вверх до упора, при этом фиксатор отключается, и опустить подушку до упора вниз;
 - б). Плавно поднимать подушку, при этом происходит срабатывание фиксаторов растоматов, сопровождаемое характерными щелчками, до достижения необходимого положения, после чего подъем прекратить. Нажатием на подушку сверху убедиться в надежности фиксации.

