

МЕБЕЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ КАБИНЕТОВ И ПАЛАТ: ШКАФ МД

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Шкаф предназначен для хранения медикаментов и других вещей в больницах и других лечебных заведениях.

Шкаф имеет модульную сборно-разборную конструкцию, изготовленную из листовой стали, покрытой экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ПОСТАВЛЯЕМЫХ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ: ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 2 ключа на ячею; инструкция по сборке; руководство по эксплуатации.

2.2 Модели комплектуются **ключевым** замком РусЛок (HILFE).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты, мм (в-ш-г)	Размер отделения, мм (в-ш-г)	Кол-во отделений, шт.	Кол-во дверей, шт	Кол-во ящиков, шт	Кол-во полок, шт	Вес, кг
Шкаф МД 2 1780/SS	1750/1850*–800–400	822–798–360	2	4 стальных	-	4 стальных	41,5
Шкаф МД 2 1780/SG	1750/1850*–800–400	822–798–360	2	2 стальных/ 2 стеклянных	-	2 стальных/ 2 стеклянных	45,1
Шкаф МД 1 1760/SS	1750/1850*–600–400	822–598–360	2	2 стальных	-	4 стальных	32,3
Шкаф МД 1 1760/SG	1750/1850*–600–400	822–598–360	2	1 стальная/ 1 стеклянная	-	2 стальных/ 2 стеклянных	35,3
Шкаф МД 2 1670/SS	1655/1755*–700–320	775–698–280	2	4 стальных	-	4 стальных	33,3
Шкаф МД 2 1670/SG	1655/1755*–700–320	775–698–280	2	2 стальных/ 2 стеклянных	-	2 стальных/ 2 стеклянных	35,5
Шкаф МД 1 1650/SS	1655/1755*–500–320	775–498–280	2	2 стальных	-	4 стальных	24,9
Шкаф МД 1 1650/SG	1655/1755*–500–320	775–498–280	2	1 стальная/ 1 стеклянная	-	2 стальных/ 2 стеклянных	26,6
Шкаф МД 1 1657/SS	1655/1755*–570–320	775–568–280	2	2 стальных	-	4 стальных	27,1
Шкаф МД 1 1657/SG	1655/1755*–570–320	775–568–280	2	1 стальная/ 1 стеклянная	-	2 стальных/ 2 стеклянных	29,3
Шкаф МД 1 1760 R	1750/1850*–600–400	822–598–360	2	1 стальная со стеклом/ 1 стальная	-	4 стальных	35,3
Шкаф МД 2 1780 R	1750/1850*–800–400	822–798–360	2	2 стальных со стеклом/ 2 стальных	-	4 стальных	45,1
Шкаф МД 2 1780 R-5	1750/1850*–800–400	822–798–360/ 822–398–360	2	2 стальных со стеклом/ 1 стальная	5	4 стальных	53,1
Шкаф МД 1 1760 R-1	1750/1850*–600–400	822–598–360/ 621–598–360	2	1 стальная со стеклом/ 1 стальная	1	3 стальных	34,3
Шкаф МД 2 1780 R-1	1750/1850*–800–400	822–798–360/ 621–798–360	2	2 стальных со стеклом/ 2 стальных	2	3 стальных	49,3

* - максимальная высота с установленными регулируемыми опорами

Отклонение веса и размеров указанных в таблице - $\pm 10\%$

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Шкаф устанавливается на ровную горизонтальную поверхность для обеспечения свободного открывания дверей. С помощью регулируемых опор вы можете выставить уровень шкафа.

Согласно Сан ПИН 2.1.3.2630 – 10, п. 1.4.3 в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность проводятся еженедельные генеральные уборки, во время которых мебель (в том числе шкафы) необходимо отодвигать от стены.

(Под перестановкой понимается: перемещение изделия на расстояние с полным отрывом опор шкафа от пола. Не допускается осуществлять перестановку шкафов путем волочения, т.е. без отрыва опор от пола).

Максимальная распределенная нагрузка на стальную полку – 30кг
Максимальная распределенная нагрузка на стеклянную полку – 10кг
Максимальная нагрузка на шкаф – 200кг

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем силиконовой смазки.

5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя в разборном виде в горизонтальном положении и в собранном виде в вертикальном положении, всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделия, необходимо его выдержать при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления шкафа.

Изготовитель не несет ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен ООО «НПО Промет», 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____