


## Набор психофизиологических и психодиагностических тестов УПФТ


- **«ВКМ»** – оценка функционального состояния и адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы по методике вариационной кардиоинтервалометрии. 2 варианта продолжительности: 128 кардиоциклов и 5 минут.
- **«ПЗМР»** – оценка функционального состояния центральной нервной системы по параметрам простой зрительно-моторной реакции. 2 варианта: 70 (75) и 30 (35) стимулов.
- **«СЗМР»** – оценка уровня операторской работоспособности по параметрам 2-х альтернативной сложной зрительно-моторной реакции. 2 варианта: 70 (75) и 30 (35) стимулов.
- **«СЗМР-3»** – оценка процессов возбуждения, торможения и подвижности нервных процессов на основе 3-х этапного теста с отличающимися заданиями.
- **«ММРІ»** – оценка психической нормативности на основе теста-опросника «ММРІ» (377 вопросов).
- **«ММ»** – оценка психической нормативности на основе теста-опросника «Мини-Мульт» (сокращенный вариант ММРІ, 71 вопрос).
- **«ПДА»** (Психодиагностическая анкета) – построение 11 шкал профиля личности с дополнительными субшкалами без вербальной интерпретации (500 вопросов).
- **«ОЛ»** – оценка акцентуаций характера на основе характерологического опросника К. Леонгарда (88 вопросов).
- **«МЛО»** (Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность») – оценка ряда психофизиологических и социально-психологических характеристик личности, отражающих интегративные особенности психического и социального развития (165 вопросов).
- **«ДАН»** – оценка уровня выраженности дезадаптивных нарушений, преимущественно астенических и психотических реакций и состояний (77 вопросов).
- **«ШТС»** – оценка уровня реактивной и личностной тревожности по шкале Спилбергера-Ханина (40 вопросов-суждений).
- **«ШТЦ»** – оценка выраженности тревожности по шкале тревожности Цунга (20 вопросов-суждений).
- **«ШДЦ»** – оценка выраженности депрессии по шкале депрессии Цунга (20 вопросов-суждений).
- **«САН»** – оперативная оценка самочувствия, активности и настроения по опроснику САН (30 утверждений).
- **«АСС»** – анкета самооценки состояния (7 утверждений).
- **«ДАП»** – опросник для выявления склонности к девиантному (аддиктивному и делинквентному) поведению. (60 вопросов).

## Примеры визуализации и анализа результатов тестирования на персональном рабочем месте психолога


### Результаты анализа вариабельности сердечного ритма (ВКМ)

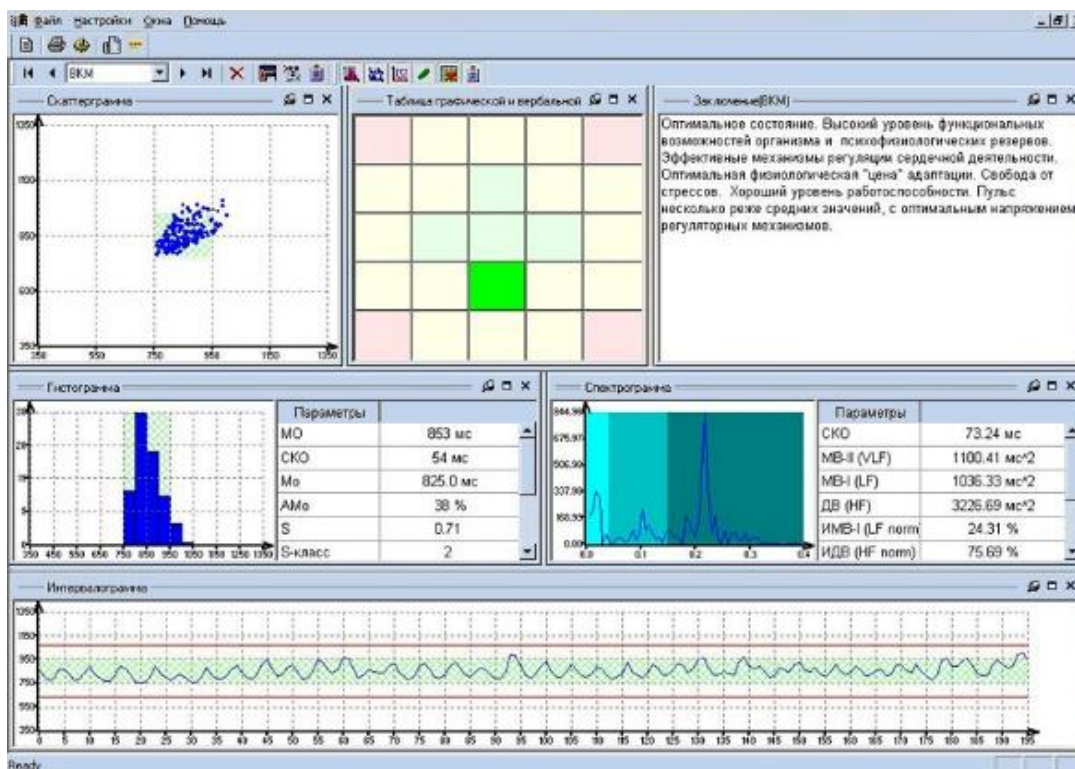


## Результаты теста по простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР)

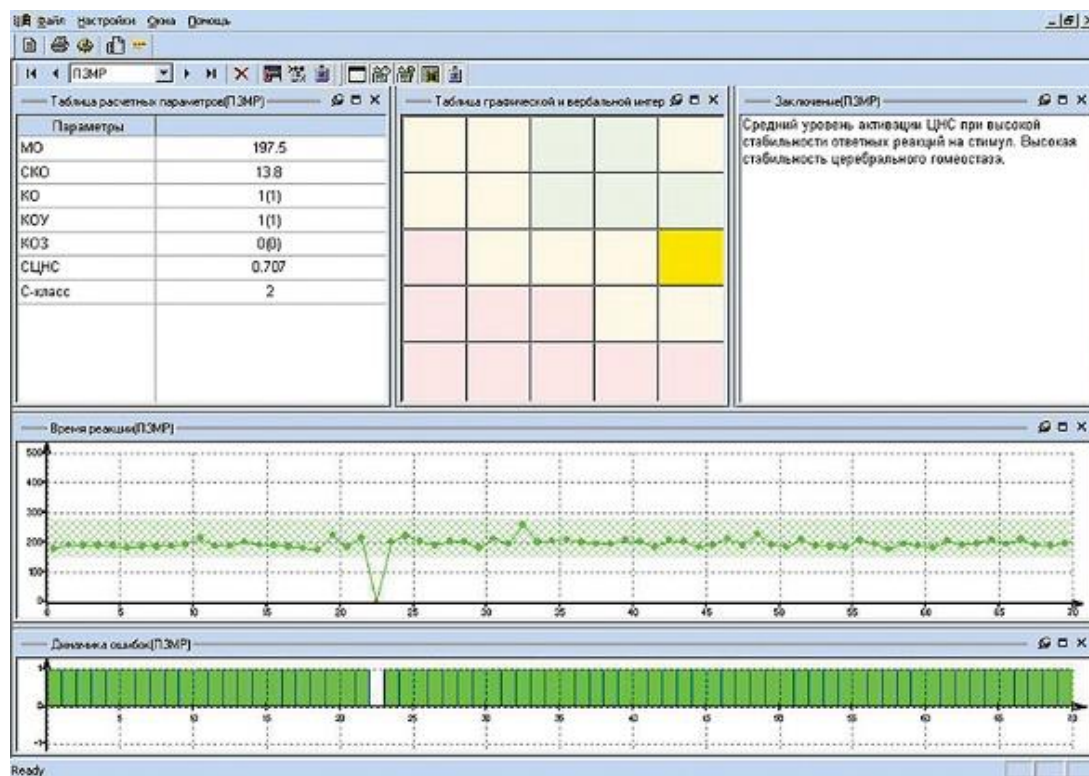


## Результаты теста по сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР)

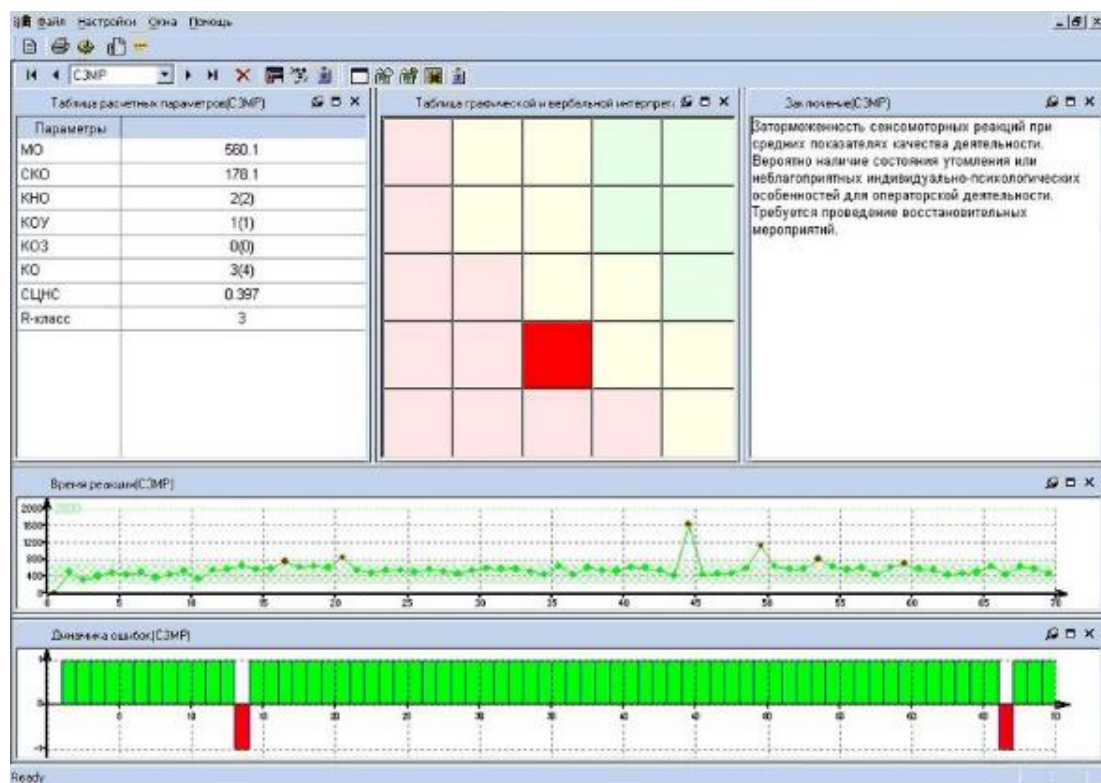


## Результаты ответов на опросник Леонгарда

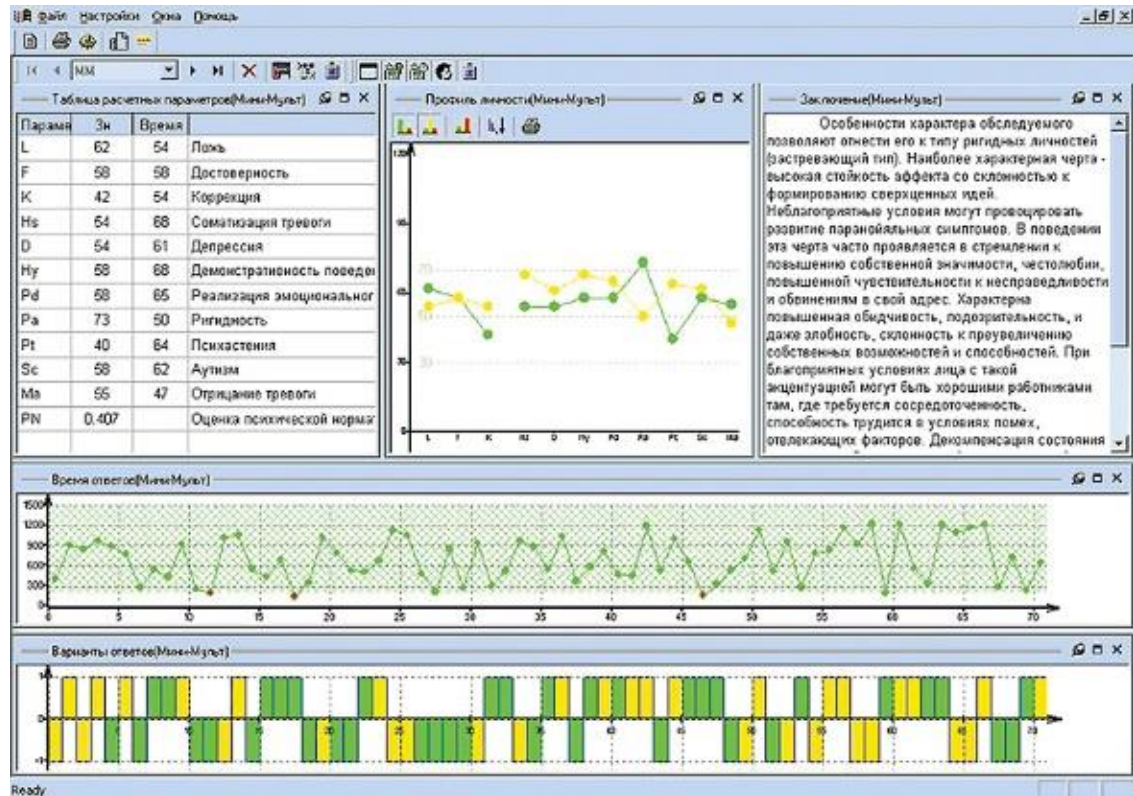


## Экран представления результатов по шкале реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина

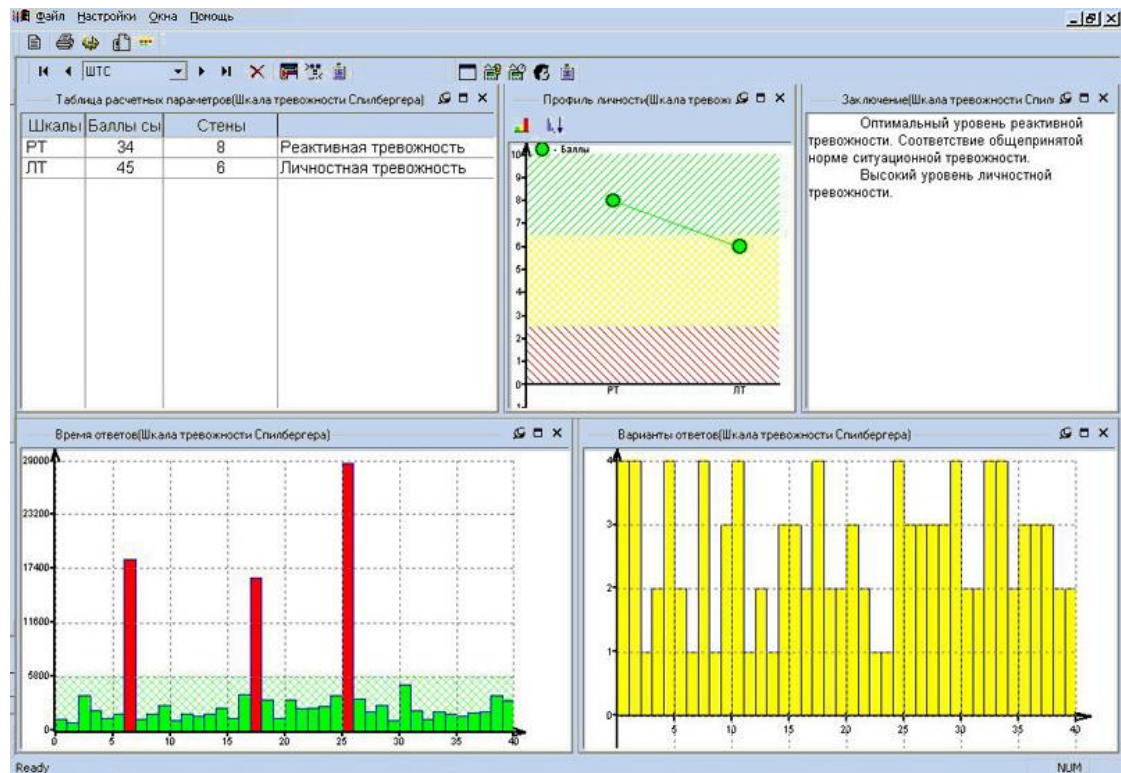

## Результаты ответов на опросник по делинквентному и аддиктивному поведению

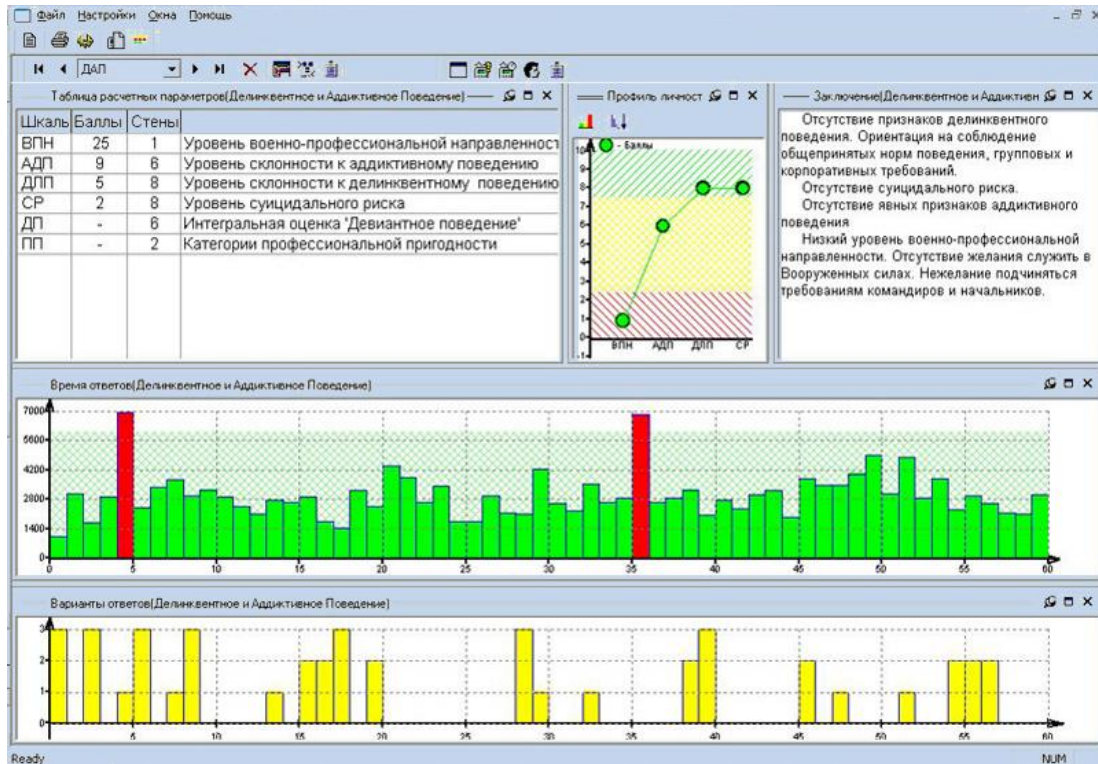

## Экран представления результатов теста САН

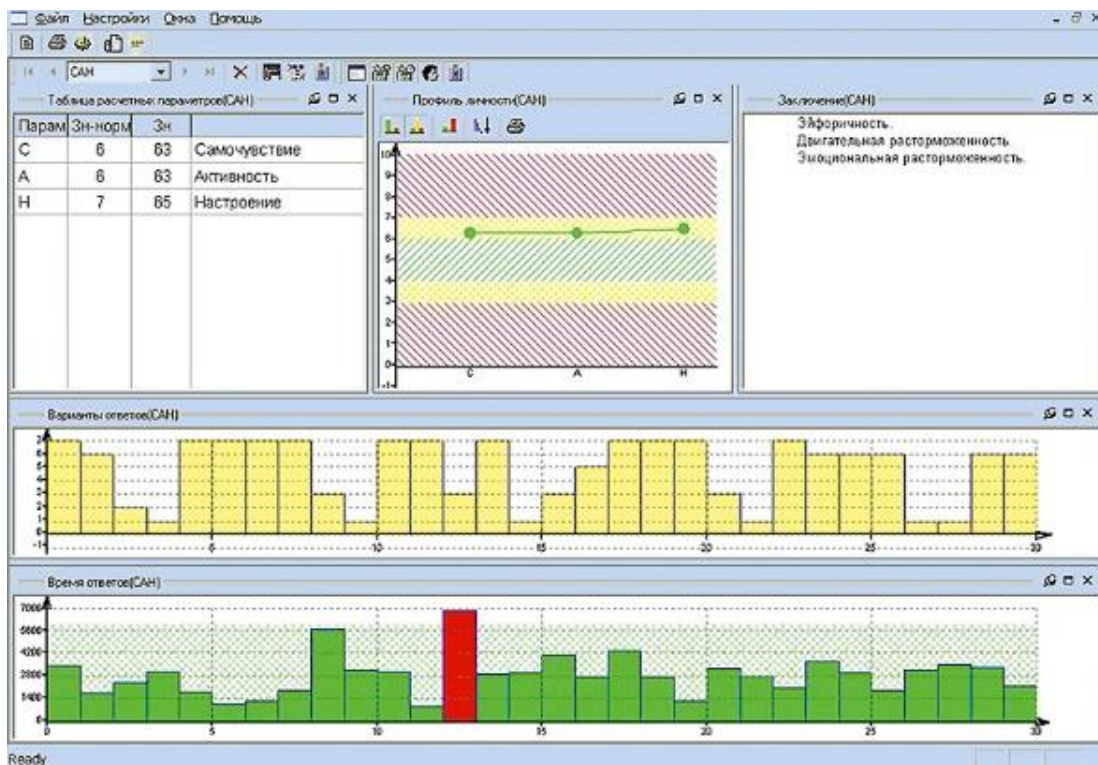

## Представление суммарной текстовой интерпретации по всему исследованию

| Интерпретация по исследованию:268                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ВКМ</b>                                                                                                                                                         | Оптимальное состояние. Высокий уровень функциональных возможностей организма, психофизиологических резервов. Эффективные механизмы регуляции сердечной деятельности. Оптимальное сочетание автономного и центрального контуров регуляции сердечного ритма. Оптимальная физиологическая "цена" адаптации. Свобода от стрессов. Хороший уровень работоспособности. |
| <b>ПЗМР</b>                                                                                                                                                        | Средний уровень активации ЦНС при достаточно нестабильных ответных реакциях на стимул. Возможна повышенная отвлекаемость внимания. Состояние ЦНС не вполне устойчивое. При выполнении операторской деятельности возможны ошибки.                                                                                                                                 |
| <b>СЗМР</b>                                                                                                                                                        | Средний уровень операторской работоспособности при среднем качестве операторской деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ММ</b>                                                                                                                                                          | Наблюдается естественная защитная реакция обследуемого на процедуру тестирования. Для него характерен достаточно хороший контроль над эмоциями.                                                                                                                                                                                                                  |
| <br>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Состояние ВНС по тесту ВКМ - отличное (S = 1.000),<br>Уровень функциональных возможностей ВНС, класс - 3,<br>Уровень напряжения ВНС, класс - 3,                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Состояние ЦНС по вариационной сенсометрии (ВСМ) - плохое (C = 0.001),<br>Уровень функциональных возможностей ЦНС, класс - 5,<br>Уровень напряжения ЦНС, класс - 5, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Операторская работоспособность - среднее (R = 0.500),<br>Уровень работоспособности, класс - 3,<br>Стабильность, класс - 3,<br>Безошибочность, класс - 3,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Психическая нормативность PN = 0.898,<br>Интегральная оценка адаптивности - сниженная (A = 0.146 )                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |