

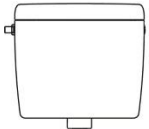

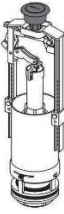

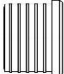






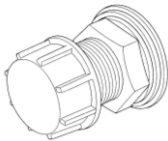
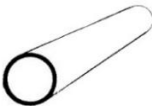



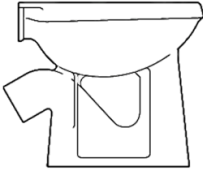


**ПАСПОРТ НА «ВИДУАР СБ-2»
КОМПЛЕКТАЦИЯ «ВИДУАР СБ-2»**

№	Наименование	Кол-во, шт.	Эскиз
1.	Унитаз сливной для видуара	1	
2.	Бачок для воды с крышкой	1	
3.	Бачок для растворов с крышкой	1	
4.	Смеситель настенный	1	
5.	Сливной механизм для верхнего бачка (арматура)	1	
6.	Шланг с лейкой и держателем для бачка с растворами	1	
7.	Манжета переходная резиновая 50x40 мм, для унитаза (1) и арматуры (5)	2	
8.	Крепеж к унитазу и бачкам, к-т	3	
9.	Паронитовая или резиновая прокладка d-100 мм для бачка с растворами	1	

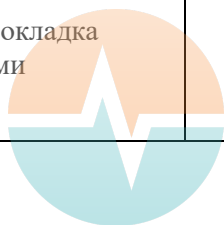

ЛИДЕРМЕД

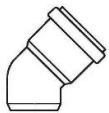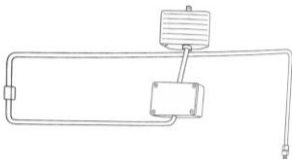WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

10.	Уплотнительное пластиковое кольцо	2	
11.	Штуцер врезка в бак с прокладкой, пластик	1	
12.	Труба соединительная для верхнего бачка и унитаза d-40 мм, длина 1000 мм	1	
13.	Труба соединительная к отводу (14) d-40 мм, длина 250 мм	1	
14.	Отвод (40x87) белый пластиковый, переход от трубы соединительной d-40 мм, длина 1000 мм к унитазу	1	
15.	Отвод (40x45) белый пластиковый, для соединения верхнего бачка с трубой (12)	2	
16.	Педальная система для подъема решетки унитаза (по желанию Заказчика)	1	
17.	Заглушка для бачков	3	
18.	Решетка для видуара	1	

ПОРЯДОК СБОРКИ «ВИДУАРА СБ-2» (СЛИВА БОЛЬНИЧНОГО СБ-2)

1. Проверить комплектность Видуара СБ-2.
1. Определиться с местом монтажа Видуара.
2. Закрепить на стену бачок (2) для воды через 2 отверстия, установив в нем сливной механизм (5) с манжетой (7), так чтобы уровень бачка от пола был на высоте примерно 1300 мм. Закрыть отверстия в бачке заглушками (17). Подвести воду к бачку через шланги (в комплект не входят).

3. Установить смеситель (4) к трубопроводу с холодной и горячей водой (место установки может быть отличной от чертежа).

4. Закрепить на стену бачок для раствора (3) через 2 отверстия, согласно схеме, предварительно установив уплотнительное пластиковое кольцо с паронитовой или резиновой прокладкой вместе (9), а через отверстие бачка вставить штуцер (11). Сливной шланг с лейкой (6) накрутить на штуцер (11). Для подвески шланга к стене, необходимо с левой стороны от растворного бачка прикрепить к стене держатель-скобу.

5. Установить трубу 0,25 (13) в унитаз через манжету-переходник резиновую 50x40мм (7).

6. Для соединения между собой унитаза и верхнего бачка для воды, необходимо соединить их пластиковой трубой d-40 мм, с нижней стороны в отвод 40x87 (14), в верхней части с выпуском сливного механизма через отвод 40x45 (15) (2 штуки), выходящего из верхнего бачка. Далее закрепить сливную трубу на крепежные скобы или хомуты при необходимости к стене (в комплект не входят).

7. Закрепить пластиковую крышку к унитазу с помощью двух пластиковых болтов.

8. Закрепить с правой стороны решетки педальную систему для возможности ее открытия при нажатии ногой (педаль поставляется дополнительно по желанию Заказчика). (Схема сборки педали прилагается отдельно)

8. Подключить холодную воду к верхнему бачку. Залить для проверки системы в нижний растворный бачок воду и проверить систему в целом. После проверки системы, в нижний бачок заливается дезинфицирующий раствор и система готова по назначению.

Гарантийный срок 12 месяцев.



ЛИДЕРМЕД

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ